

评估环境安全后进入急救现场

① 判断意识

- 拍打双肩并呼叫



② 呼叫

- 拨打急救电话120
- 周边取得AED
- 电话指导CPR




③ 判断呼吸

- 胸腹起伏
- 5-10秒



④ 进行心肺复苏(CPR)

- 按压频率：100-120次/分钟
- 按压深度：至少5CM

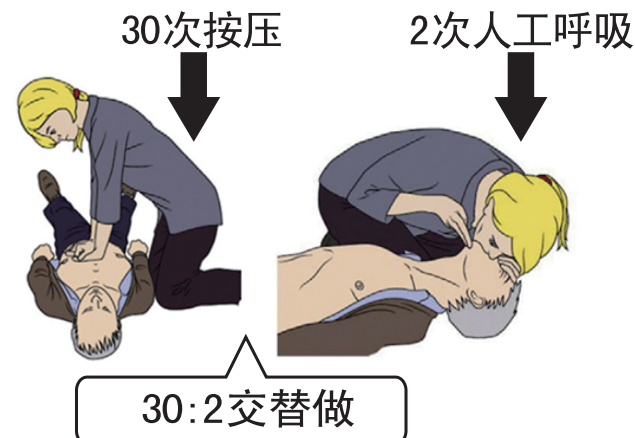

⑤ 尽早使用AED除颤

(越快越好)

- 全程真人语音、动画指导操作
- 自动分析心律并提示电击
- 按语音或动画提示操作



⑥ 除颤与心肺复苏

- 除颤后请即刻心肺复苏
- 如果复苏过程中患者有了反应和呼吸，则停止按压
- 否则应持续心肺复苏，2分钟后，AED会再次分析心律，完成下一次除颤准备。




AED演示视频




AED
自动体外除颤仪

仅3步操作，挽救生命快速简单！

！仅限患者出现以下状况时使用：无意识、无呼吸

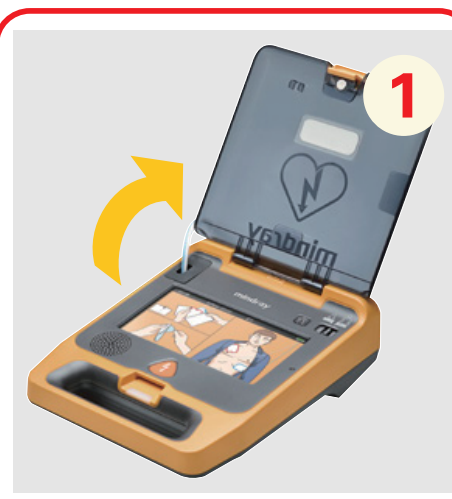

1
打开设备上盖
自动激活设备电源

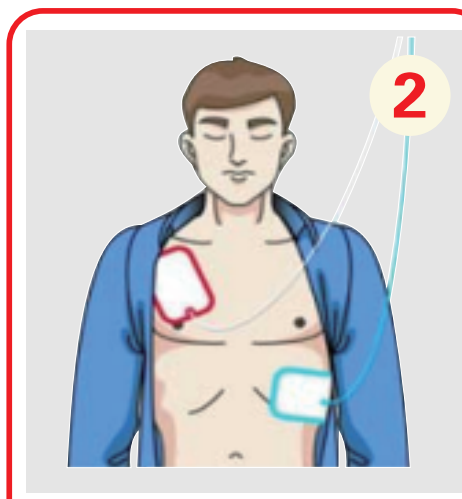

2
解开病人胸部衣服
按图示粘贴电极片



3
如果AED分析后建议电击，
按下橙色电击键。

注意：病人胸口需裸露；需避开胸口外伤及植入器械。

该设备需由受过CPR/AED课程培训的人员使用。

售后服务：400-700-5652
186-3800-2279